
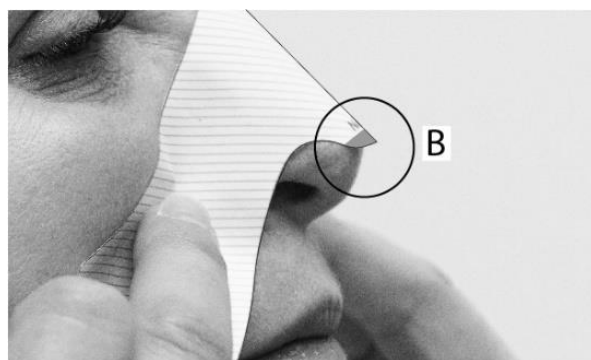


## Sélecteur de taille pour Facembrace® de type nasal

Voici comment déterminer la taille de Facembrace® qui convient à votre visage.

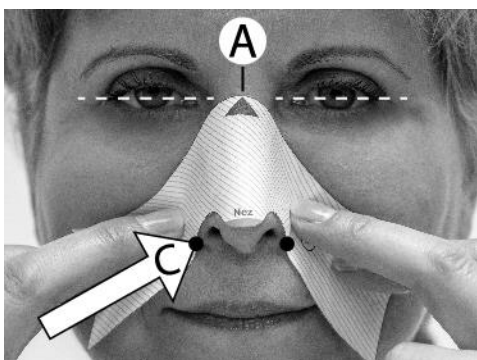

### MATERIEL REQUIS:

- Un miroir
- Version imprimée du sélecteur de taille
- Une paire de ciseaux
- Une règle

### INSTRUCTIONS:




1. Imprimez en dimension « taille réelle » les 3 pages du fichier « Sélecteur de taille ». Confirmez que l'impression est bien à l'échelle: à l'aide d'une règle, mesurez l'échelle verticale et l'échelle horizontale à la page 2. Toutes deux doivent mesurer exactement 10 cm, ou 4 po, selon le cas.
2. À l'aide d'une paire de ciseau, découpez les trois formes (P, M, G) qui se trouvent à la page 2.
3. Choisissez une première forme à essayer.
4. En vous référant à l'image ci-dessus, devant un miroir, positionnez la forme découpée sur votre nez tel qu'indiqué. Assurez-vous de bien positionner la pointe du triangle au milieu de la ligne de vos yeux (**lettre A** sur l'image) et au milieu de l'arrête de votre nez.
5. La taille vous convient lorsque la découpe papier passe bien par le coin externe de vos deux narines (**lettre C** sur l'image) et que la pointe du nez (en gris) dépasse légèrement le bout de votre nez (**lettre B** sur l'image). Notez qu'il est possible que la forme couvre une partie des coins de votre bouche, ce qui est parfaitement normal.

Commandez la taille de Facembrace® correspondant à la découpe qui convient à votre visage.

Notez que: **P = Petit M = Moyen G = Grand**

10 cm

Échelle

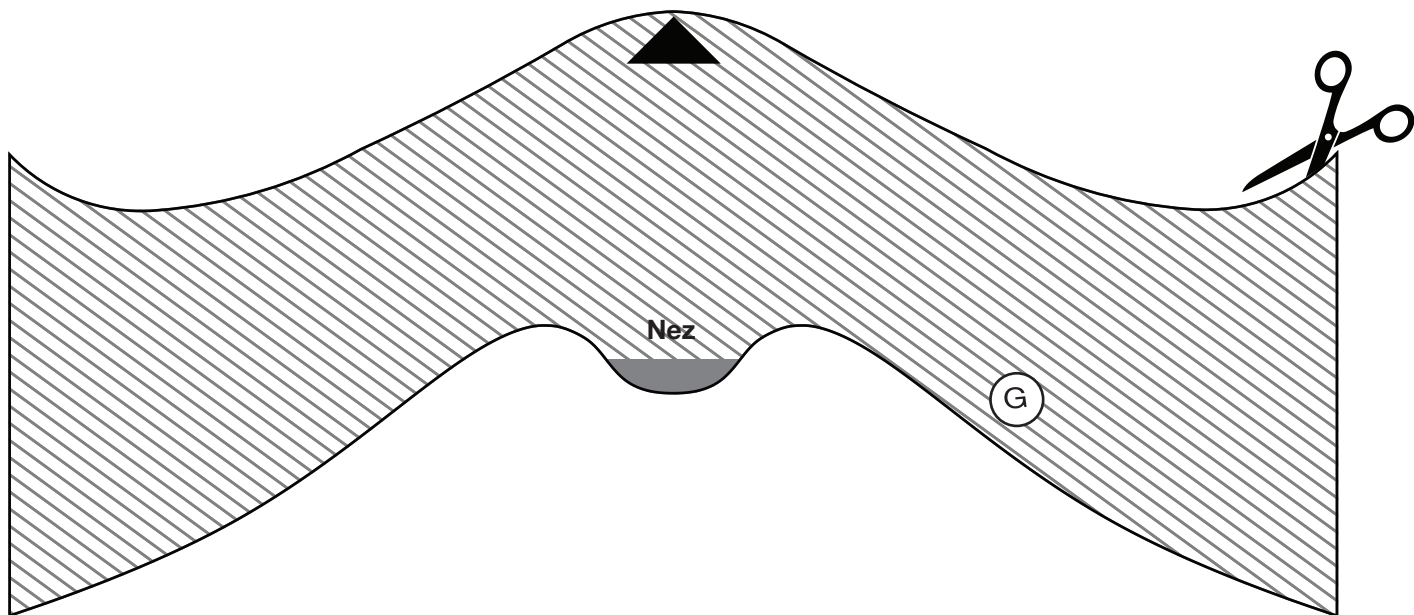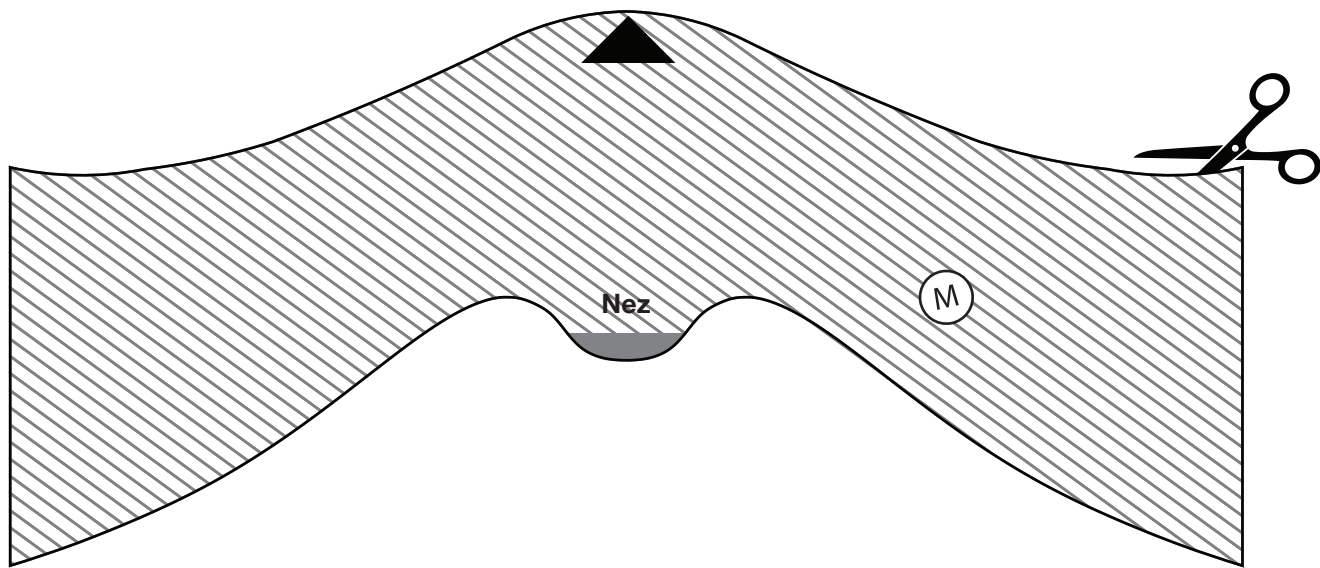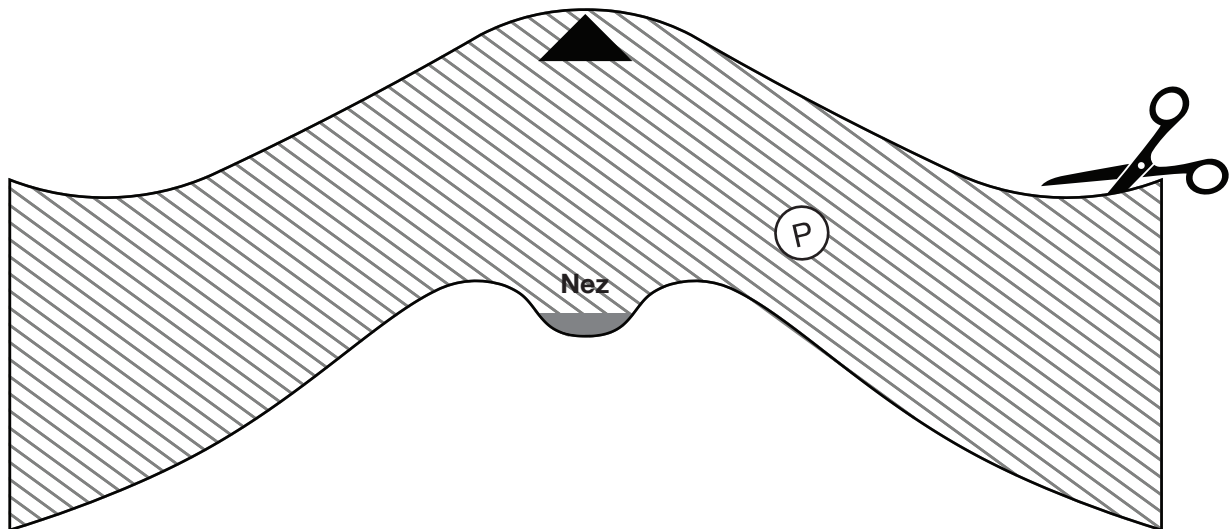

Échelle

10 cm



# facembrace<sup>MC</sup>

## Validation de la taille de votre Facembrace®

Après la réception de votre Facembrace®, voici comment valider que celui-ci est de la bonne taille.



### Position du Facembrace® sur votre nez

Demandez l'aide d'une personne pour qu'elle regarde votre profil. Le Facembrace<sup>MC</sup> doit reposer à plat sur la pente de votre nez et bien passer par le coin externe de vos deux narines.

### Situation A : Trop grand

- Dépassement important du bout du nez
- Pas d'espace entre le début de l'oreille et le Facembrace®



### Situation B : Taille adéquate

- Léger dépassement du bout du nez
- Un doigt d'espace entre le début de l'oreille et le Facembrace®



### Situation C : Trop petit

- Aucun dépassement du bout du nez
- Plus d'un doigt d'espace entre le début de l'oreille et le Facembrace®